

自動錠剤分包機への医薬品の充填は 2人1組で

医薬品充填者

充填時

ダブルチェックを
行う

- 充填をする医薬品のカセットを取り出す。
- カセットと医薬品を並べ、2人1組で確認する。
- 確認後すぐに医薬品をカセットに補充する。
- 充填したカセットを機械にセットする。

複数の医薬品を同時に充填する場合は、
交差するなどの間違いが生じやすいので、
上記の手順を遵守し、1医薬品ごとに
チェックと補充を繰り返す。

特にハイリスク薬を充填する際は
注意レベルをあげること！